

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用口腔内清掃キット 70927000

口腔ケア用吸引チップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、吸引器に接続された吸引チューブおよび吸引コネクタに接続して使用する。

吸引スワブ



チューブ・チップ: ポリスチレン
スワブ: ポリウレタン

吸引ブラシ



シャフト・ブラシ: ポリエチレン

吸引スワブおよび吸引ブラシが接続する代表的な医療機器は以下のとおり。

販売名: KimVent オーラルケア

一般的名称: 唾液吸引チューブ

医療機器認証番号: 226ADBZX00009000


【使用目的又は効果】

本品は、吸引器に接続された吸引チューブおよび吸引コネクタに接続し、歯面および口腔内の清掃ならびに口腔内の吸引を行うために使用される。

【使用方法等】

以下に標準的な使用方法を示す。(※印は本品に含まれない医療機器を示す。なお、吸引チューブ、吸引バルブおよび吸引ハンドルはKimVent オーラルケアに含まれる)

- 1) 吸引器※に吸引チューブ※を接続する。吸引チューブ※には吸引バルブ※が装着されているが、必要に応じて、吸引ハンドル※に付け替える。

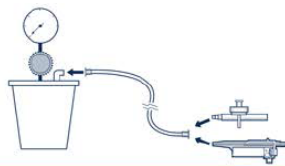

- 2) 吸引器※をオンにして、吸引圧を適切なレベルに設定する。



【注意】 本品を使用する際、吸引圧は -100mmHg (-13.3kPa) 以下を目安として設定すること。

- 3) 吸引バルブ※又は吸引ハンドル※に、使用する本品を取り付ける。



【注意】 接続の際、吸引スワブの先端が外れないこと又は吸引ブラシのブラシが抜けないことを確認すること。

【注意】 接続の際、本品と吸引バルブ又は吸引ハンドルとの接続性を確認し、十分な接続を有していること及び吸引圧がかかることを確認すること。

- 4) 口腔ケアを適切に行い、口腔から余分な体液を吸引する。



【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 意識障害の患者に使用する場合、患者が無意識に嚙むおそれがあるため、吸引は慎重に行うこと。必要に応じて咬合阻止器の使用を検討すること。
- 2) 過度な力を加えると歯茎を傷つける原因となるため、出血傾向のある患者に手技を行う際は十分な注意を払うこと。

<不具合・有害事象>

- 1) 重大な有害事象
気道閉塞
- 2) その他の有害事象
粘膜損傷
- 3) その他の不具合
脱落

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温、多湿、直射日光、凍結及び水ぬれを避けて保管すること。
2. 有効期間
包装材に記載のとおり

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者:

ハリヤード・ヘルスケア・インク

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

TEL: 045-682-5150

製造業者:

** Avanos Medical, Inc. (アバノス メディカル インク)

製造所所在国:

メキシコ