

個人防護具 (PPE) の適切な着脱

着脱には手順があり、感染予防のためにその手順を守ることが大切です。
(グローブ、ガウン、バイザー付マスクで着脱する場合を示しています)

着け方

ガウン		バイザー付マスク		手袋
				

脱ぎ方

CDC 方式

手袋			手指衛生	ガウン		
						
バイザー付マスク		手指衛生	<ol style="list-style-type: none"> ① 手袋 手袋の外側を反対の手袋をした手で持ち、外す。外した手袋は手袋をした方の手で持つ。手袋をしていない方の手の指を反対側の手袋の下の手首の所に滑り込ませて外す。 ② 手指衛生を行う。 ③ ガウン 首・腰のひもを解く。ガウンを裏返すようにして脱ぐ。脱いだガウンは体から離して持ち、廃棄する。 ④ バイザー付きマスク 紐あるいはゴム紐だけを持って外す。 ⑤ 手指衛生を直ちに行う。 			
						


WHO 方式

ガウン・手袋	手指衛生	バイザー付マスク		手指衛生
				
<ol style="list-style-type: none"> ① 自己、他者、周囲の環境への汚染を避ける。最も汚染が激しい物から取り外す。ガウンと手袋を中表に折込むようにして取り外し、安全に廃棄。 ② 手指衛生を行う。 ③ バイザー付きマスクは汚染しないよう後ろから取り外し、安全に廃棄。 ④ 手指衛生を直ちに行う。 				


オーバー・ザ・ヘッド アイソレーションガウンの着脱

着け方


製品番号:29549,43146,69606共通

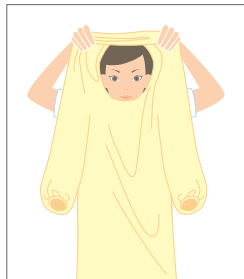


ガウンを広げて、首を通す。

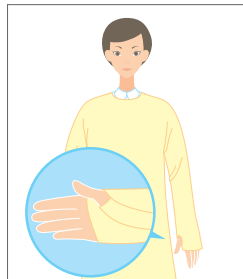

両袖に腕を通して、サムフック^{*}に親指をかける。(*69606除く)

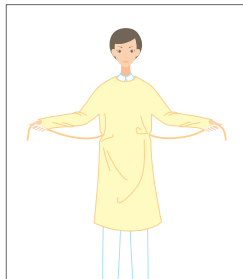

腰ひもを、左右それぞれ胸に回す。

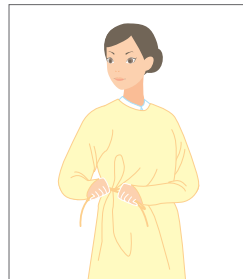


腰ひもを右脇でしぼる。
(29549, 69606は後ろでしぼる)




施設基準に従い、その他の保護具を装着後、最後にグローブを装着する。

脱ぎ方 汚染度や施設基準に応じて脱いでください。


製品番号:43146

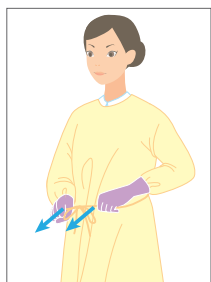


ガウンの腰ひもを引きちぎる。

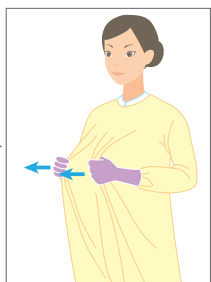


胸の下(肘を90度程度に曲げた高さ)でガウンの生地を両手でつかみ、前方へ引っ張る。

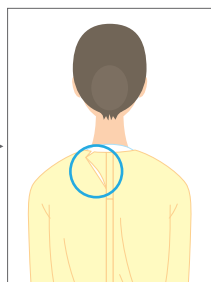


後身ごろの首回り付近にある生地の切り込み部分が、ちぎる際の起点になる。

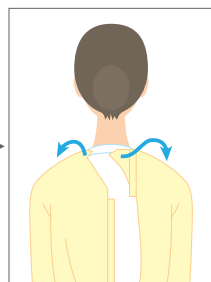

生地を前方下方向に強く引っ張り、後身ごろの上端部分を引きちぎる。

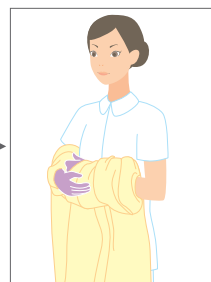

背部の生地を前身ごろ側へ、中表になるように引き寄せる。

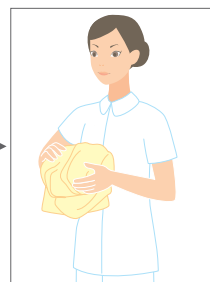


そのまま前身ごろも中表にクルクルと丸め、施設で定められた廃棄ボックスに廃棄する。


製品番号:29549,69606 ※イラストは69606を脱ぐ場合を示していますが、29549も同様です




両手をクロスさせ、左右のガウン生地をつかむ。

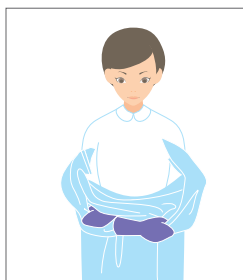


クロスした状態で生地を前方下方向に強く引っ張り、後身ごろの上部を引きちぎる。

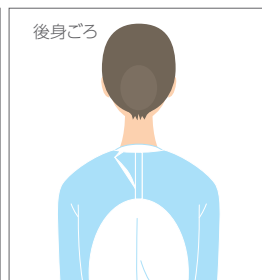

後身ごろ

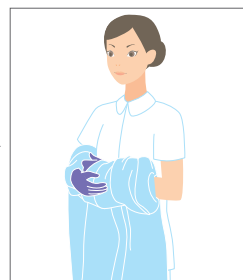

背部の生地を前身ごろ側へ、中表になるように引き寄せる。

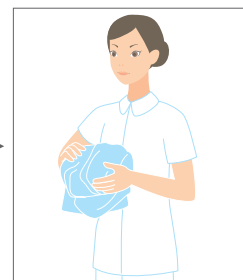

そのまま前身ごろも中表にクルクルと丸め、施設で定められた廃棄ボックスに廃棄する。

ハリヤードのアイソレーションガウン(オーバー・ザ・ヘッドタイプ)

製品番号	名称	色	カフ	製品特長	入数(ケース)
43146	AAMI 2 オーバー・ザ・ヘッド アイソレーションガウン	黄	サムフック	3層SMSファブリックにより、バリア性と通気性を両立したオーバーヘッドスタイルガウン。AAMI PB70 Level2適合。	10枚× 10/パック
29549	オーバー・ザ・ヘッド アイソレーションガウン	黄	サムフック	3層SMSファブリックにより、バリア性と通気性を両立したオーバーヘッドスタイルガウン。	10枚× 10/パック
69606	コンフォート防水ガウン カフ付き	青	ニットカフ	背面通気性を確保、内側はソフトタッチ加工のオーバーヘッドスタイルガウン。50種類以上の薬剤耐性試験済 (ASTM F739-12)	10枚× 10/パック

製造販売元: O&M Halyard Japan 合同会社 〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

製品に関するお問い合わせ TEL: 03-4565-4576 Email: Customer_JPN@hyh.com