

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

手術用ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はドレープ部(不織布/ポリシート)、補強材、パウチ、インサイズ等から構成され、開窓部や粘着部を有したものである。

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバーまたは障壁として用いる。

患者を手術中の熱、炎または他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。

【使用方法等】

1. 包装より無菌的に本品を取り出す。
2. 術野を消毒し、消毒した皮膚を十分に乾かす。
3. 本品を適切な位置に固定して展開する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 高温を発する機器類に接しないよう注意すること。
- 2) 皮膚から粘着材を剥がす際は、皮膚の粘着部を180°折り返す方向へゆっくり剥がすこと。[皮膚剥離を引き起こす恐れがあるため。]
- 3) 使用中は、接着部品への過荷重を避け、接着部の剥がれに注意すること。
- 4) 包装を開封した後は、速やかに使用すること。また、包装の破損したもの、開封済みのもの、または水ぬれしたものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。

2. 有効期間・使用の期限

* 包装材に記載のとおり[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

O&M Halyard Japan 合同会社

東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー12階

TEL:03-4565-4576

