

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 70911000

ニトリル歯科用グローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 以下を行わないこと。
 - ・ 本品の再使用

【形状・構造及び原理等】

- * 合成ゴムを主材料とし、副材料に打粉を含まない(パウダーフリー)、未滅菌の歯科用手袋である。本品は、一回限りの使用で、再使用せず、使い捨てるものである。

【主要寸法】

- 掌幅:
- XS=70/S=80/M=95/L=110/XL=120 (±10) mm
全長:
- 230mm 以上

【使用目的又は効果】

本品を歯科用手袋として使用する場合、歯科の診察、治療及び処置に用いられることを目的とする。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して着用する。

注意 適切なサイズ等の製品を選択すること。

注意 使用中に本品に破損や損傷等異常が認められた場合には使用を中止すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 同一患者のみに使用すること。
- 2) かゆみ、かぶれ、発疹、ショック等の症状が現れた場合には直ちに使用を中止し医師に相談すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- 3) 本品は、強い刺激性を有する化学物質の直接曝露に対する適用を目的とする製品ではないため、そのような目的で使用しないこと。
- 4) ピンホール等の異常が認められる場合には使用しないこと。
- 5) 本品を廃棄する場合は感染等に注意し、院内の手順に従って適切に処理すること。
- 6) 開封する前に本品の包装を点検すること。包装に破損等の異常がある場合、その製品は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器、オゾン発生装置等に近づけないこと。

2. 有効期間・使用の期限

- * 包装材に記載のとおり[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

O&M Halyard Japan 合同会社
東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー12階
TEL:03-4565-4576

