

機械器具 29 電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナー 70654000

ハリヤード チップクリーナー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は研磨砥粒面、ベース部、粘着部等から構成されている。

【使用目的又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等の除去を目的とした、単回使用のクリーナーである。

【使用方法等】

1. 包装より無菌的に本品を取り出す。
2. アクティブ電極に付着した炭化物等を研磨砥粒面に当てて擦るようにして除去する。
3. 裏面のシールをはがして、ドレープなどに貼り付けて使用できる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 複数の患者には使用しないこと。
- 2) 過度な力で擦らないこと。
- 3) 滅菌を開封したら速やかに使用すること。また、包装の破損したもの、開封済みのもの、または水ぬれしたものは使用しないこと。
- 4) 本品の二次的加工をしないこと。
- 5) PTFE コーティング電極には使用しないこと。[コーティングがはがれるおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
2. 有効期間・使用の期限
包装材に記載のとおり[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

O&M Halyard Japan 合同会社
東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー12階
TEL:03-4565-4576

